



# 移动肺保

远大洁净空气产品 肺保系列

病菌过滤效率  $\geq 99.39\%$

PM2.5过滤效率  $\geq 99.9\%$

由广州市微生物研究所检测: KJ20200111

运动出行与工作, 安全防护全天候  
正压送风氧气足, 增强免疫抗病毒

型号: FB2



扫码观看使用视频



自吸过滤式防颗粒物呼吸器, 执行标准: GB2626-2019


**BROAD CLEAN AIR TECHNOLOGY**  
**远大洁净空气科技有限公司**

销售: 400-677-6666 www.broadair.net  
 服务: 400-883-9333 中国长沙远大城

## 移动肺保

让人在任何肮脏环境摆脱空气污染  
 今天, 全世界穿戴产品花样百出, 却罕有人类真正需要的。一个人人买得起、极其轻巧的充电式高效过滤器——远大移动肺保, 可以99.9%过滤PM2.5, 让人在任何地方彻底隔绝空气污染。并且, 可以提高呼吸量, 使人倍感舒适、精力旺盛。一只小小的远大移动肺保, 是雾霾天气的避难所, 是矿工、建筑工人和传染病医护人员的依靠, 是呼吸病人的生存希望。



## 医院

医生  
护士  
呼吸病人



## 运动

跑步  
骑车  
健身



## 雾霾天

室外  
室内  
车内




## 施工


电焊  
矿井  
装修



## ■ 结构图

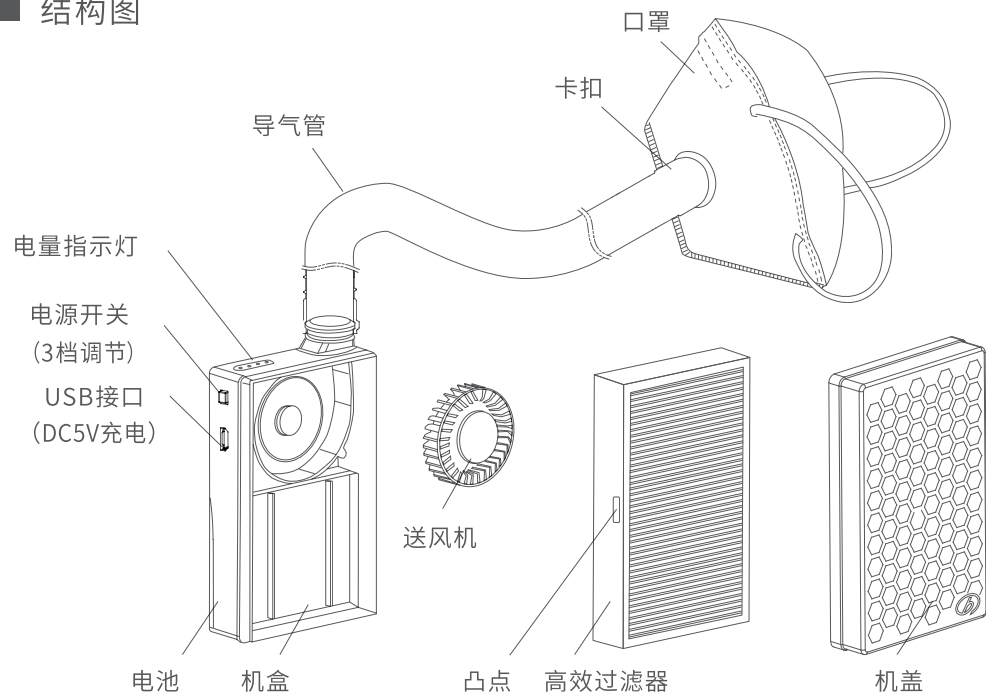

## ■ 随机配件

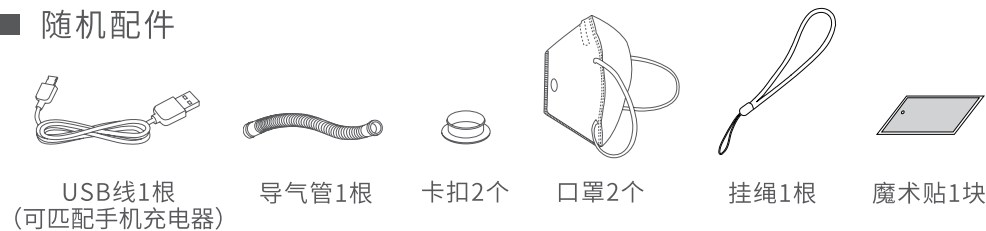

## ■ 异常情况处理

No.	现象	原因	处理方法
1	风量不足	过滤器堵塞	更换高效过滤器
2	风机不转	风机或电路板坏, 电池没电, 未抽掉电池隔绝薄膜	维修或更换, 充电, 抽掉电池隔绝薄膜
3	充不进电	电路板或USB线坏或适配器坏	维修或更换
4	过滤器装不进	装反了	凸点向上
5	气管漏气	导气管老化或损坏	更换

## ■ 参数表

项目	1档	2档	3档
风量 m <sup>3</sup> /h	2	3	4
功率 W	0.6	0.9	1.3
噪音 dB(A)	27	30	33
电源	锂电池3.7V/7.4Wh (符合民航安检≤100Wh, 可上飞机)		
过滤效率	99.9% 过滤 PM2.5		

## ■ 安装步骤

- 用卡扣把口罩与导气管连接
- 将导气管另一端与主机连接
- 首次开机前请打开电池盖取出隔绝膜
- 长按电源开关2秒开机

## ■ 风量调节

- 日常开1、2档
- 劳动时、运动时用3档
- 首次使用建议, 运行1~2小时吹净胶料气味再戴

## ■ 口罩更换

- 准备个新的口罩, 选择在靠近鼻孔的左侧或右侧, 画一个 $\phi 12\sim 14$ mm圆
- 圆对折, 用剪刀剪开
- 装上卡扣和气管即可

## ■ 常规佩戴方法

- 戴上挂绳, 将机器吊挂于胸前, 戴上已接气管的口罩
- 在室外温度较低时主机应放在口袋内或者挂在胸前, 以减少冷空气带来的不适感
- 亦可以将魔术贴上的挂绳取下, 将魔术贴粘于安全帽上, 便于作业

## ■ 过滤器更换 (停机断电后再操作)

- 当风量低于新过滤器70%, 需更换过滤器
- 更换高效过滤器: 打开机盖, 从机器内取下高效过滤器进行更换, 累计运行约500小时更换。安装高效过滤器时, 凸点必须向上, 否则过滤器装不进
- 口罩脏了就需清洗或更换

## ■ 保修

- 购买之日起, 免费保修1年。因产品设计、制造原因造成的故障, 或由于厂方运输造成的损失, 可免费维修或更换配件
- 注意: 机身贴有编号, 也可作为保修依据

## ■ 保养

- 用户自行保养, 保养内容:  
更换高效过滤器
- 机身不可接触液体, 避免雨天暴露使用
- 机身不可受到强烈冲击
- 设计寿命: 20年  
(期间可能需更换轴承)

## 合格证 / 质保卡

产品名称: 移动肺保

产品型号: FB2

产品批次:

检验员:

购买日期:

出售店铺:

销售员:

